

Hurtig start guide

Lightwriter SL50

Art.nr 1740200



VELKOMMEN TIL DIN LIGHTWRITER



Lightwriter SL50 er en nem og hurtig måde at kommunikere på!

Din Lightwriter bliver evt. leveret med beskyttelsesfilm på vinduerne. Du bør fjerne disse, før du bruger din Lightwriter.



HVAD ER DER I KASSEN?

Kontroller, at alt er til stede, når du åbner kassen.

Tastaturramme-sæt



Oplader



Ethernetkabel

Værktøjssæt



Brugermanual og
Hurtig start guide



Arbejdstaske

Ekstra taster



USB-nøgle




Lightwriter SL50

OPLAD BATTERIET

Før du taget din Lightwriter i brug skal du sætte opladeren i opladerstikket på venstre side af Lightwriteren. Du kan bruge Lightwriteren, mens den lader op.

Du skal lade din Lightwriter blive siddende i opladeren i ca. **12 timer**, før batteriet er fuldt opladet. Herefter skal Lightwriteren oplades **regelmæssigt i 3-4 timer** for at få til en hel dags anvendelse. Det bedste tidspunkt hertil er natten over.

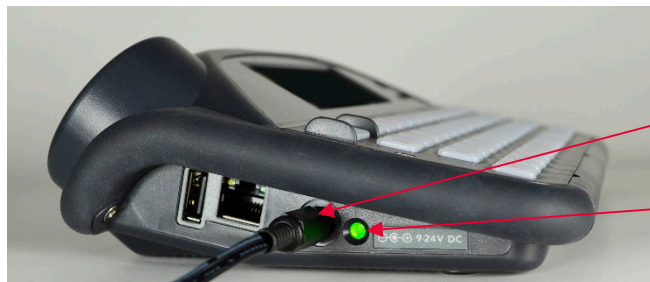

Opladerstik

Opladerlampe

TÆND FOR LIGHTWRITEREN

For at tænde din Lightwriter skal du trykke på **Strøm**-knappen



Det tager et øjeblik, før din Lightwriter starter op.

Hvis du ikke bruger din Lightwriter eller trykker på en vilkårlig tast i en kort periode, slukker vinduet, og det går i **Slumretilstand**. Tryk på en vilkårlig tast for at vække den, så kan du fortsætte, hvor du slap.

For at slukke tryk **Shift**




og herefter **Strøm**



BEGYND AT TALE


Når du tænder for din Lightwriter, vil du se **Taleskærmbilledet**.

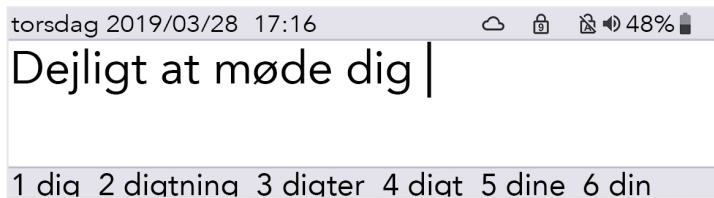
















Dit Lightwriter-tastatur kan bruges på næsten samme måde som et almindeligt tastatur til at skrive ord og sætninger på. Det, du skriver, kommer frem på skærmen foran dig.

Tryk på **Enter**,  så vil Lightwriteren udtale de ord, du har skrevet, samtidig med, at den viser dem på **Ledsagevinduet**.

Mens du skriver, vil du se en række tekstforslag under hovedskærmen. Tryk på den relevante **Taltast** for at bruge et tekstforslag. **Number Lock** skal være slået fra, for at dette virker.

Brug **Shift**  for at skrive et af de røde symboler på tasterne.

LÆR DIT TASTATUR AT KENDE

	Strømforsyning		Symboler
	Enter		Valuta (tryk Shift+3)
	Menu		Tal
	Number Lock		Venstre og højre piletast
	Shift		
	Bogstaver og mellemrum		
		Slet	
	Union (alarm)		

OPSÆTNING AF DIN LIGHTWRITER

Med nogle få enkle indstillinger kan din Lightwriter konfigureres med dine personlige præferencer.

BRUG MENUERNE

For at få adgang til de daglige indstillinger i **Brugermenuen**, tryk på **Menu** 



Lyd


Vindue

System

Tip - Find mulighederne for den **Avancerede menu** ved at trykke **Shift-Menu**.

Brug **Venstre** og **højre piletast**   for at rulle op og ned i mulighederne.

Når du er inde i en vilkårlig menu, tryk **Enter**  for at vælge eller **Strøm**

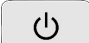 for at annullere.

GEM DINE BASISINDSTILLINGER

Stemme – Gå til **Shift-Menu** > **Stemme** > **Vælg stemme**. Her finder du et udvalg af mandlige og kvindelige stemmer at vælge imellem. Tryk **Enter** for at bekræfte dit valg.

Lydstyrke for stemme – Gå til **Menu** > **Lyd** > **Mikser** > **Lydstyrke for Stemme**. Vælg mellem lydstyrkeniveauerne 0-10, og tryk **Enter** for at bekræfte.

Styrke for tastetryk – Gå til **Menu** > **Lyd** > **Mikser** > **Tastetryk**. Vælg mellem styrkeniveauerne 0-10, og tryk **Enter** for at bekræfte.

Dato og tid – Datoen og tiden bør være automatisk indstillet til dig. Men hvis du har brug for at ændre dem, skal du gå til **Shift-Menu** > **Dato og tid**

Scanningshastighed – Gå til **Shift-Menu** > **Scanning** > **Scanningshastighed**. Her kan du indstille den hastighed, som nøglerne scannes med.

Scanningslyd – Her kan du indstille den lyd, der høres, når tasterne scannes. **Shift-Menu** > **Scanning** > **Scan lyd**.

Tip - Genvej til at rette **Hovedlydstyrken** ved at trykke på tasterne



OPDATER DIT SOFTWARE

Det er vigtigt, at du holder dit Lightwriter-software opdateret, så det bliver ved med at køre problemfrit. Opdateringer kan indeholde vigtige fejlrettelser, sikkerhedsopgraderinger og forbedrede funktioner.

Du kan bruge en internetforbindelse til at opdatere dit software på ethvert tidspunkt. Du skal blot sætte et ethernetkabel i din Lightwriter og den anden ende i din router.



Et symbol med download fra en sky angiver, at du er ved at downloade nye opdateringer. Når du er færdig, vil skærmen bede dig om at genstarte. Så er din opdatering færdig.

(KUN SCANNING) SÆT KONTAKTERNE I

For at starte scanningen skal du blot sætte to kontakter i Port 1 og 2.



Tip - Du kan også scanne med én kontakt eller ved at bruge en hvilken som helst tast på tastaturet (flere oplysninger i Brugermanualen).

Tryk på **kontakten i Port 2** for at bevæge dig gennem de markerede rækker eller taster. Brug **kontakten i Port 1** for at vælge den markerede række, og igen for at vælge den markerede tast.

Tryk på en **vilkårlig tast** for at vende tilbage til almindeligt tastaturadgang.

FRA	Tryk Shift  og herefter Strøm 
TIL	Tryk på Strøm 
SLUMRETIKSTAND	Hold Strøm-tasten  nede i 2 sekunder. Du kan trykke på en vilkårlig tast for at vække den igen.
VÆLG MENUPUNKT	Tryk Enter 
FORLAD MENU-SKÆRMBILLEDET	Tryk på Strøm 
AFSLUT TEKST	Når du skriver tekst, vil Strøm-tasten  slette hele linjen med tekst.
LYDSTYRKE	Tryk og hold Lydtasten  kombineret med Venstre  og Højre  piletast nede for at skrue op og ned for lydstyrken. 
DÆMPE	Tryk på Lydtasten  for at dæmpe din Lightwriter, også mens den taler. Tryk på Lyd  igen for at ophæve tilstanden.
FREMTVING GENSTART	Hold Strøm nede i 10 sekunder – indtil vinduet slukker og begynder at blinke igen.
ALARM*	Tryk og hold Union  nede, indtil alarmen lyder.

*Skal være aktiveret i Indstillinger.

Få mere at vide om din Lightwriter ved at læse Brugermanualen.

+46 8 594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.com